

～使い捨てフェイスガードシート～ 0.2

マスクとの併用でより効果的にご使用になれます。

～フェイスガードシートとは？～



写真は小サイズを使用しております



■ 特 徴

- 高 透 明: 高透明性のポリプロピレン樹脂 (以下、PP) を使用
- 超 軽 量: 厚さ 0.2mm の PP のため軽量
- 防曇加工: 呼吸をしても曇りにくい
- 帯電防止加工: 飛沫・埃等を引き寄せにくい
- 安 全: 食品に使用する容器と同じ製品のため、安全
- サ イ ズ: サイズも自由に変更可能
- 使 い 捨 て: 使い捨てで除菌の手間を省く

■ 好きなサイズに修正可能


ご自身でハサミを使用し、
お好きなサイズに切って
ご使用が可能です。



■ 使用ケース

- 地域密着型の診療のお医者様、受付の方
- 銀行、飲食店などでの接客を行う方
- 自治体などでお客様との対応を行う方

■ 組み立て方

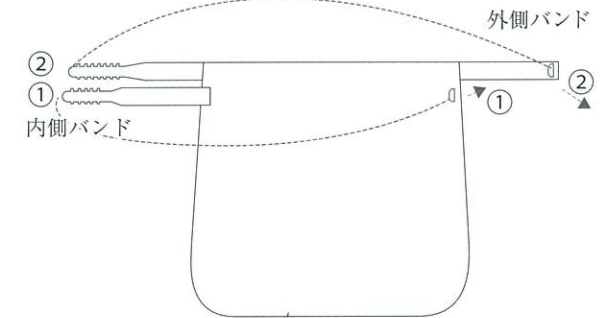


- ①内側バンドの長さを調整します。
- ②外側バンドでしっかり固定をして下さい。

内側バンドと外側の間に空間を作ってください。
空間は通気性を良くして曇り防止となります。

ワンポイント

フェイスガードと額の間を
開ける事により曇りにくくなります。

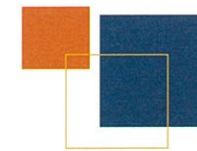

この空間

